

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe

Krzesło toaletowe na kółkach

Kod produktu: FS 894 / FS 696




1. Wykonanie

Krzesło toaletowe, składane wykonane jest ze stalowej, chromowanej ramy. Model FS 894 posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami, natomiast model FS 696 posiada nóżki zakończone kółkami, z czego tylne wyposażone są w hamulec. Krzesło posiada możliwość złożenia, wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik sanitarny z pokrywką. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Elementy krzesła toaletowego:

- a. podłokietniki
- b. deska sedesowa
- c. pojemnik sanitarny
- d. regulacja wysokości - sztyft blokujący
- e. hamulec na tylnych kołach
- f. nóżki zakończone kółkami
- g. nasadkami antypoślizgowymi

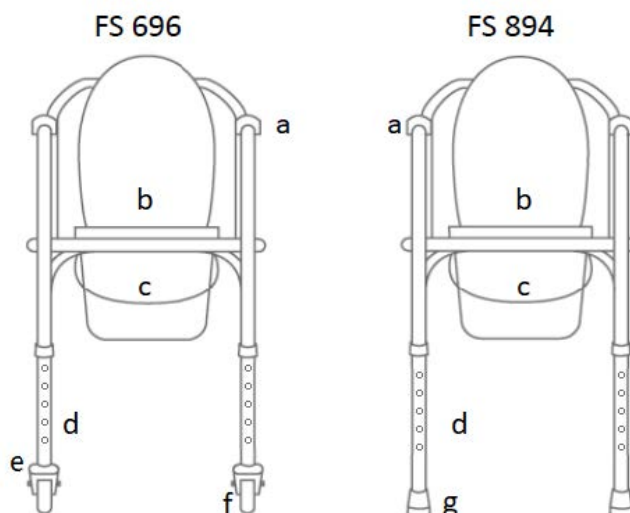

2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z

dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika. Kółka transportowe umożliwiają wygodny najazd na sedes po wyciągnięciu pojemnika sanitarnego.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie krzesła toaletowego

- Krzesło postawić na podłożu. Należy chwycić za plastikowe uchwyty i rozłożyć krzesło. Następnie należy zamontować kolejno przednią część ramy oraz pojemnik sanitarny na ramie krzesła.
- W celu złożenia krzesła należy wyciągnąć pojemnik toaletowy, odchylić do dołu przednią część ramy a następnie jeden bok odchylić do przodu, a drugi do tyłu.

Regulacja wysokości

- Aby wyregulować nóżki, należy wcisnąć metalowy sztyft na nodze krzesła, wybrać odpowiednią wysokość wewnętrznej rurki, a następnie zablokować położenie rurek względem siebie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na podłożu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	53 cm
Szerokość wewnętrzna	47 cm
Głębokość całkowita	53 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-53 cm
Wysokość całkowita od podłoża	73-83 cm

Wymiary siedziska	43 cm x 38 cm
Waga krzesła FS 894	7,1 kg
Waga krzesła FS 696	7,5 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Kolor ramy	Srebrny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z krzesła toaletowego, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła:

- Krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik oraz deskę siedziska. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021