

Instrukcja użytkowania

WHOSP-F

Wydanie: 09.2014

Qmed®

WHOSP-F jest lekką, komfortową i higieniczną szyną, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb.

Wskazania:

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Opis produktu:


Szyna na dłoń, nadgarstek i przedramię. Lekka aluminiowo-stalowa konstrukcja pokryta pianką PVE daje możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postęпами leczenia. Posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców.

Zakładanie:

Ukształtować szynę według zaleceń. Następnie umieścić dłoń i przedramię, zapiąć rzepy, aby ustabilizować szynę. Należy unikać kształtowania szyny, gdy znajduje się na dłoni pacjenta.

Rozmiar	Średnica nadgarstka (cm)
S	6,5 – 8,0
M	8,0 – 9,5
L	Powyżej 9,5

Aby wybrać odpowiedni rozmiar, należy zmierzyć dłoń na wysokości stawów śródrečno paliczkowych.

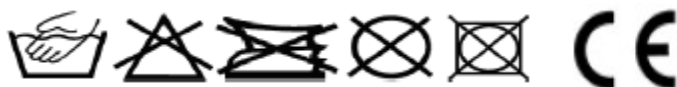

Ostateczną decyzję dotyczącą zastosowania i wyboru zaopatrzenia podejmuje lekarz specjalista.

 mdh sp. z o.o.
90-349 Łódź
ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24
tel. +48 042 674 83 84
fax. +48 042 636 52 21
www.mdh.pl