

Instrukcja użytkowania
Bingo
Fotelik rehabilitacyjny
Wydanie MG 05.2016



Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Opis produktu	3
3. Zastosowanie	4
4. Przeciwwskazania	4
5. Użytkowanie.....	4
6. Bezpieczeństwo użytkowania.....	6
7. Czynności obsługi i konserwacji	6
8. Parametry techniczne:	8
9. Symbole.....	9
10. Dane teleadresowe.....	10


1. Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Jesteśmy głęboko przekonani że spełni Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed pierwszym użytkowaniem. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu przedstawienia niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń znacząco przyczyni się do przedłużenia trwałości i estetyki wyrobu. Pragniemy zaznaczyć że na bieżąco staramy się poprawiać jakość naszych produktów, co może skutkować drobnymi zmianami które nie są zawarte w instrukcji.

2. Opis produktu

Drewniany mobilny fotelik rehabilitacyjny; przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z samodzielnym siedzeniem. Wielofunkcyjność i modułowa budowa fotelika pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stabilna konstrukcja z kółkami jezdnymi wyposażonymi w blokady postojowe daje poczucie bezpieczeństwa.

Rama wykonana ze sklejki, zabezpieczona nietoksycznym bezbarwnym lakierem. Tapicerka wykonana z poliestru w kolorze niebieskim i pianki PU.

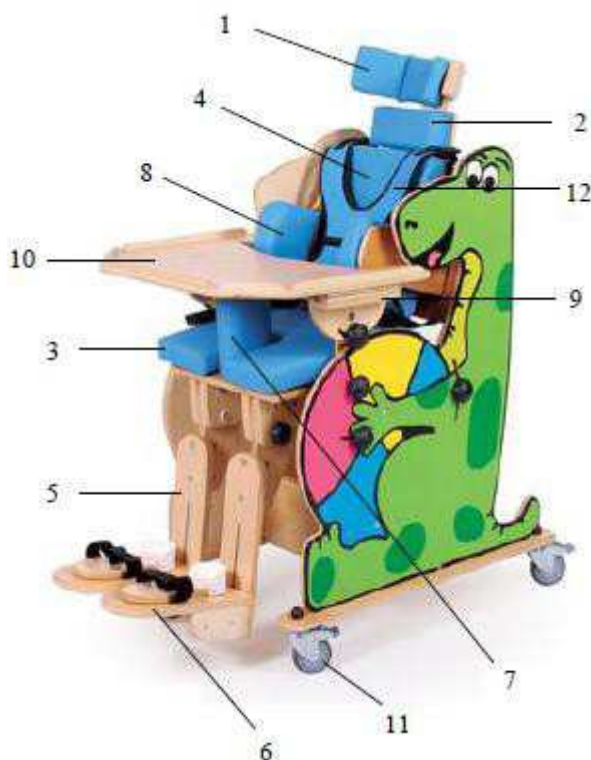

Ilustracja 1.

1. Profilowany zagłówek stabilizujący głowę z regulacją wysokości.
2. Poduszka oparcia karku.
3. Siedzisko (z regulacją kąta nachylenia 0-40°, wysuw do przodu).
4. Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia pleców do pozycji leżącej.
5. Podnóżek (regulacja wysokości, kąta pochylenia).
6. Mocowanie stop (przesuw przód/tył, prawo/lewo, pochylenie).
7. Klin obdukcyjny, tapicerowany do stabilizacji nóg.
8. Regulowane boczne stabilizatory tułowia.

9. Podłokietniki (regulowana wysokość oraz kąt nachylenia).
10. Błat do ćwiczeń manualnych I zabawy (wycięcie na tułów) z regulacją wysuwu oraz kąta pochylenia.
11. Koła wyposażone w blokadę postojową,
12. Kamizelka stabilizująca tułów.

3. Zastosowanie

Drewniany mobilny fotelik rehabilitacyjny; przeznaczony do prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami układu nerwowego, mających problem z samodzielnym siedzeniem. Wielofunkcyjność i modułowa budowa fotelika pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stabilna konstrukcja z kółkami jezdnymi wyposażonymi w blokady postojowe daje poczucie bezpieczeństwa.

Rama wykonana ze sklejki, zabezpieczona nietoksycznym bezbarwnym lakierem. Tapicerka wykonana z poliestru w kolorze niebieskim i pianki PU.



4. Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Nigdy nie należy zostawiać dziecka samego w urządzeniu bez nadzoru osoby dorosłej.


Dodatkowo należy zapoznać się z instrukcją obsługi zakupionego fotelika rehabilitacyjnego.

5. Użytkowanie


Bezpieczne użytkowanie wyrobu wymaga przeszkolenia opiekuna przez wykwalifikowany personel medyczny (fizjoterapeuta), pomoże on dobrać najlepsze nastawy i regulacje fotelika, oraz udzieli niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu procesu rehabilitacji.

- a) Wyjąć fotelik z opakowania, sprawdzić, czy urządzenie nie posiada widocznych pęknięć, deformacji.
- b) Mocowanie stóp dla celów transportowych zostało przekręcone po przeciwnej stronie podnóżka, należy odkręcić pokrętkę „I” (Ilustracja 2.), a następnie umieścić mocowanie stóp na zewnętrznej stronie podnóżka (jak na Ilustracji 1., przykręcić pokrętkę „I”).
- c) Upewnić się, czy wszystkie połączenia gwintowe nie są poluzowane.
- d) Zablokować koła przez naciśnięcie blokad.
- e) Zdemontować klin rozporowy.
- f) Dopasować wymiary fotelika do indywidualnych potrzeb dziecka, w tym celu należy posadzić dziecko w foteliku i wyregulować:
 - Kąt podparcia siedziska (pokrętła „A”) (Ilustracja 3.)
 - Kąt podparcia pod plecy (pokrętła „E”) (Ilustracja 4.)
 - Wysokość zagłówka (pokrętła „G”) (Ilustracja 4.)
 - Wysokość położenia poduszki oparcia karku (pokrętła „H”) (Ilustracja 4.)
 - Położenie kątowe podnóżka (pokrętło „K”) (Ilustracja 2.)
 - Wysokość, pochylenie i rozstaw mocowania stóp (pokrętła „I”) (Ilustracja 2.)
 - Kąt położenia stopy (pokrętło „J”) (Ilustracja 2.)
 - Wysokość i kąt pochylenia podłokietników (pokrętła „B”) (Ilustracja 3.)
 - rozstaw blokady bioder (pokrętła „F”) (Ilustracja 4.)


- g) Przykręcić klin rozporowy (regulacja położenia, pokrętło "C") (Ilustracja 2.)
- h) Zapiąć pas mocujący tułów.
- i) Zapiąć pasy w podnóżku do stabilizacji stóp.
- j) Stolik należy zamontować poprzez wsunięcie go w podłokietniki dociśnięcie śrubami "L". (Ilustracja 2.)
- k) Kąt pochylenia blatu z podłokietnikami można dodatkowo regulować przy pomocy pokrętła „D”. (Ilustracja 3.)

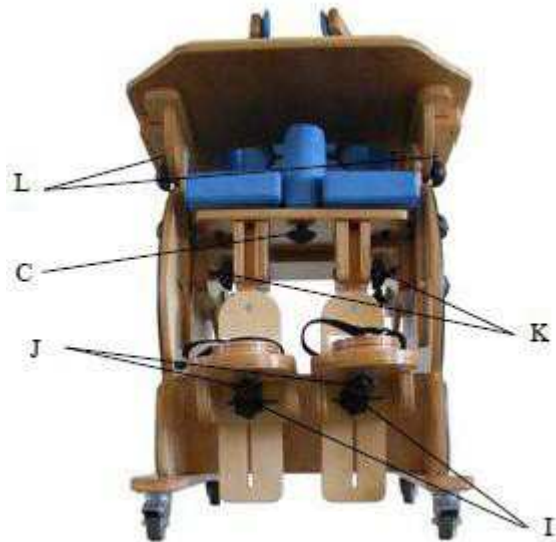

Ilustracja 2.

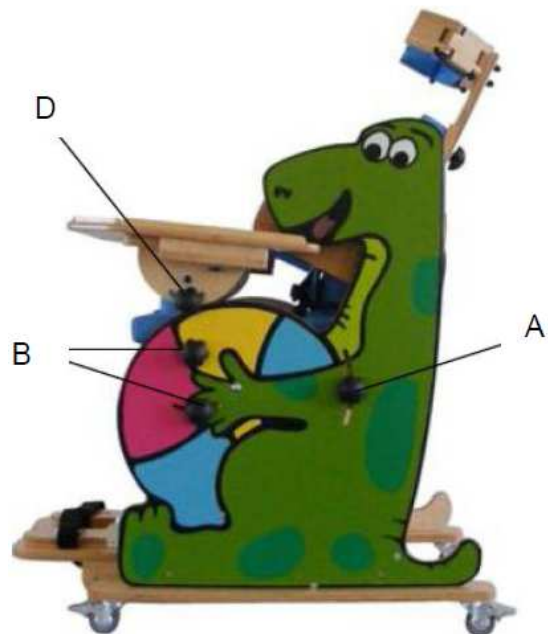

Ilustracja 3.

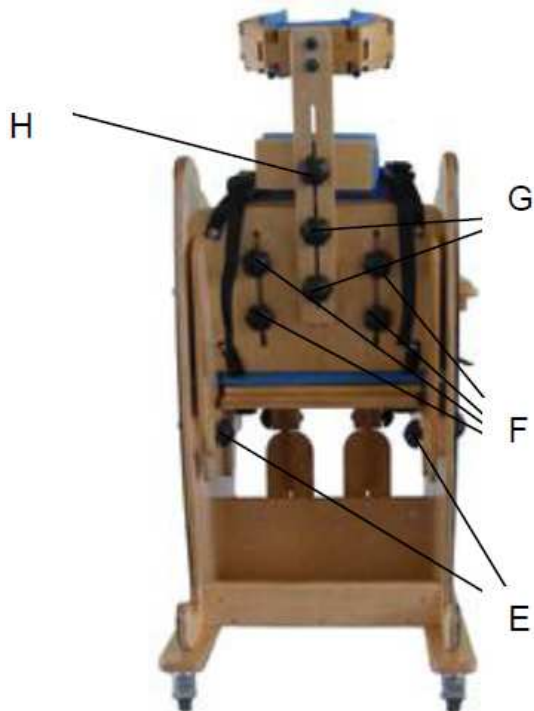

Ilustracja 4.



6. Bezpieczeństwo użytkowania

OSTRZEŻENIE!

- a) Wsiadanie i zsiadanie z fotelika wymaga zaciągnięcia blokad kół jezdnych.
- b) Wsiadanie i zsiadanie z fotelika wymaga pomocy opiekuna,
- c) Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w foteliku bez nadzoru opiekuna.
- d) Fotelik jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, tylko na równych powierzchniach.
- e) Użytkowanie fotelika na podłożu nie dającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaszczonym jest niedopuszczalne – ryzyko upadku.
- f) Fotelik przeznaczony dla dzieci o wzroście 85-145 cm (pomiar w pozycji leżącej) i maksymalnej wadze 35 kg.
- g) Podnózek służy tylko do podparcia nóg osoby siedzącej, zabrania się stawiania na nim.
- h) Fotelik należy przechowywać z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
- i) Należy **BEZWZGLĘDNIE**, co najmniej raz na trzy miesiące wykonać przegląd wszystkich elementów konstrukcyjnych wyrobu w tym:
 - sprawdzić działanie mechanizmów regulacji ustawień i blokad,
 - sprawdzić działanie blokad kół,
 - dokładnie sprawdzić stabilność oraz wygląd fotelika
- j) Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- k) Urządzenie posiada małe części – istnieje niebezpieczeństwo połknięcia.

7. Czynności obsługi i konserwacji

- a) Każdorazowo należy sprawdzać siłę zacisku śrub regulacyjnych fotelika.
- b) Ramę fotelika czyścić wilgotną szmatką.
- c) Na bieżąco usuwać zanieczyszczenia (nici, włosy) z ruchomych elementów fotelika (kół, podnóżków, śrub zaciskowych blokad).
- d) Zabrudzenia tapicerki należy usuwać możliwie szybko przy pomocy szmatki nasączonej roztworem słabego detergentu i letniej wody. Czynność należy powtarzać do momentu usunięcia plamy. Tapicerkę należy osuszyć chłonną czystą szmatką lub chusteczką, nie ścierać. Nie należy używać zbyt mokrej szmatki, ponieważ grozi to powiększeniem plamy, a w skrajnych przypadkach zniszczeniem tapicerki lub pianki wypełniającej. Nie prasować.
- e) W celu utrzymania krzesła w dobrym stanie, ważne jest, aby regularnie je czyścić i przechowywać w odpowiednim miejscu. Przechowywanie krzesła w miejscach o wysokiej wilgotności (pralnia, łaźni) lub na zewnątrz w niehigienicznych warunkach może spowodować utratę jego parametrów.

Nie wolno stosować:

- rozpuszczalników,
- środków do czyszczenia WC,
- środków z zawartością chloru,
- ostrych szczotek i twardych przedmiotów,
- żrących środków czyszczących.
- Nie czyścić krzeselka przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!

Konserwacja i kontrola stanu technicznego

Częstotliwość	Przedmiot kontroli	Uwagi
Przed pierwszym użyciem	Kontrola stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w opakowaniu.	Należy sprawdzić, czy żadne elementy fotelika nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych
Przed każdym użyciem	Kontrola blokady postojowej	Należy upewnić się czy wszystkie blokady działają bez zarzutu.
Co dwa tygodnie	Przytwierdzenie śrub, nakrętek i pod kątem ich prawidłowego zamocowania.	Należy upewnić się czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
Co dwa miesiące	Czystość, stan ogólny.	W przypadku powstały uszkodzeń mechanicznych należy bezzwłocznie skontaktować się z wytwórcą.
Raz w tygodniu	koła	Należy kontrolować stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piasku.
Raz w miesiącu	Osie kół	Osie kół należy konserwować, napszczając pomiędzy oś a piastę kilka kropel środka konserwującego smarującego

TRANSPORT I PRZENOSZENIE FOTELIKA

Podczas transportu w szczególności należy zwrócić uwagę aby:

- urządzenie było transportowane bez użytkownika w środku – nie jest przeznaczony jako dodatkowe siedzisko w pojeździe transportującym;
- pasy mocujące przytwierdzone były do stałych i mocnych punktów fotelik;
- fotelik powinien być zamocowany tylko za elementy konstrukcji;
- po zapięciu pasów fotelik nie powinien przesuwac się w każdym kierunku;
- podczas transportu, urządzenie powinno mieć załączone hamulce na każdym kole.

Podczas przenoszenia w szczególności należy zwrócić uwagę aby:

- fotelik był przenoszony bez użytkownika w środku,
- fotelik był złożony do pozycji siedzącej, wtedy można przenieść go chwytając za 4 punkty wskazane na rysunku poniżej po obydwu stronach fotelika:



Ilustracja 5.


Naprawa


- Z sytuacji zaistnienia konieczności wykonania napraw należy zwrócić się do wytwórcy.

Obsługa klienta

- Gdyby mieli Państwo pytania lub potrzebowali pomocy, należy zwrócić się do wytwórcy.

8. Parametry techniczne:

Dopuszczalny ciężar użytkownika	 35 kg
Trwałość wyrobu	5 lat od daty produkcji
Wysokość oparcia (wraz z zagłówkiem) (cm)	46-62
Głębokość siedziska (cm)	25-41
Wysokość podnóżków (cm)	25-31
Wysokość podłokietnika od podłoża (cm)	68-76
Szerokość siedziska (cm)	15-35
Szerokość oparcia (cm)	15 - 27
Szerokość fotelika (cm)	58
Długość fotelika (cm)	95 - 150

Waga urządzenia z pełnym wyposażeniem (kg)	27
	Podano na wyrobie

Materiały: drewno, stal, nylon, poliester, pianka PU.

9. Symbole



Potwierdzenie spełnienia norm UE



Wytwórca



Data produkcji



Zajrzyj do instrukcji używania



Ostrzeżenie




Numer katalogowy



Numer seryjny



Chronić przed wilgocią

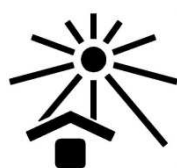

Chronić przed światłem słonecznym



Dopuszczalny ciężar użytkownika



Użycie wewnątrz budynków



Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu



Możliwość zakleszczenia palców



Produkt przeznaczony do przewozu samochodem



Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania jako siedzenie do transportu w pojeździe mechanicznym.



Produkt przeznaczony do przewozu samolotem

10. Dane teleadresowe:



mdh sp. z o.o.

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź, Polska

tel. +48 42 674 83 84

fax. +48 42 636 52 21

www.mdh.pl www.viteacare.com