

AT51040
INSTRUKCJA OBSŁUGI CHODZIK



MD



PL

WPROWADZENIE

Chodziki są produkowane z wysokiej jakości materiałów, wyposażone w tackę, torbę i hamulce blokujące. Rączki są regulowane na właściwą wysokość, a chodzik łatwo się składa do transportu lub przechowywania.

ZASTOSOWANIE/PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do wspomagania osoby o ograniczonej sprawności ruchowej podczas poruszania oraz przenoszenia drobnych zakupów. Użytkownik powinien posiadać niezbędne umiejętności fizyczne, wzrokowe i poznawcze, aby bezpiecznie obsługiwać chodzik. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą. Ważne jest, aby użytkownik przeczytał i zrozumiał wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji. Produkt można używać wielokrotnie.

PRZECIWWSKAZANIA

ograniczenia fizyczne lub umysłowe (np. upośledzenie wzroku), które uniemożliwiają bezpieczne obchodzenie się z produktem.

UŻYTKOWANIE


1. Zawsze upewnij się, że hamulce są w pozycji zablokowanej, jeśli chodzik jest pozostawiony bez nadzoru
2. Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie kółka są zabezpieczone
3. Sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo
4. Przed użyciem sprawdź, czy pokrętła regulacji wysokości uchwytu są zabezpieczone
5. Sprawdź, czy chodzik jest w pełni rozłożony
6. Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia złożonego chodzika.
7. Trzymaj ręce z dala od mechanizmu składania, aby uniknąć ryzyka przycięnięcia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zawsze chodzić z chodzikiem płynnym, kontrolowanym ruchem. W razie potrzeby zwróć się o pomoc.
2. Nie wieszaj przedmiotów na dźwigniach hamulca lub uchwytach ręcznych. Może to wpłynąć na działanie hamulca i/lub stabilność chodzika.

LISTA CZĘŚCI SKŁADOWYCH

1. Taca 2. Uchwyt 3. Dwa tylne kółka 4. Rama główna 5. Kółka przednie 6. Dwie śruby przednie 7. Dwie śruby w kształcie litery "T"

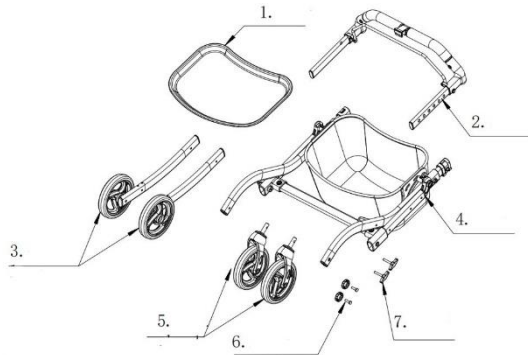

SPECYFIKACJA


Szerokość całkowita: 60 cm
Długość całkowita: 58cm
Wysokość tacki: 67cm
Rozmiar tacki: 39.5*27.5CM
Regulowana wysokość uchwytu: 85-97cm
Waga: 6.2kg
Rozmiar opakowania: 51*17*63cm
Koła pełne: 6"
Maks. waga użytkownika: 108kg



Niniejszy symbol oznacza maksymalną wagę użytkownika!

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wyjmij wszystkie części.
2. Wyjmij ramę główną i otwórz ją tak jak pokazuje strzałka. (1)
3. Włóż przednie kółka do ramy głównej. (2)
4. Włóż tylne kółka do ramy głównej. (3)
5. Otwórz dwa przyciski 'on-off' (4) a następnie włóż rękojeść do ramy głównej i zablokuj przycisk 'on-off'.
6. Umieścić tacę na ramie głównej (5)

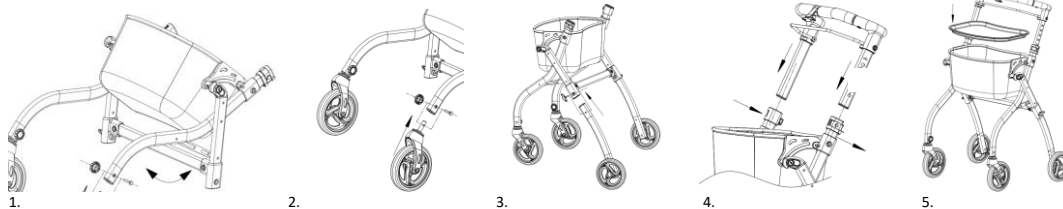

DEMONTAŻ

Wykonaj wszystkie powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

REGULOWANA RĄCZKA

Rączki chodzika mogą być regulowane, aby dostosować je do różnych użytkowników. Wystarczy otworzyć dwa przełączniki i ustawić je na żądanej wysokości. (4) Proszę upewnić się, że dwie strony są na tej samej wysokości.

REGULACJA DZIAŁANIA HAMULCA

Podczas poruszania się uchwyt dźwigni hamulca znajduje się w pozycji środkowej. Pociągnij do góry dźwignię uchwytu hamulca, aby zahamować. Naciśnij w dół na dźwignię uchwytu hamulca, aby zablokować tylne koła. Aby zwolnić blokadę należy delikatnie pociągnąć w górę uchwyt dźwigni hamulca, tak by wrócił do pozycji środkowej.

Regulacja hamulców odbywa się w następujący sposób:

Przekręć śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć siłę nacisku. Następnie zablokuj nakrętkę blokującą regulację w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, trzymając jednocześnie śrubę regulacyjną nieruchomo. Regulacja hamulca zredukowana do lekkiego nacisku może być nieskuteczna podczas hamowania. W takim wypadku należy dokręcić nakrętkę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przytrzymując jednocześnie śrubę regulacyjną w pozycji spoczynkowej.

KONSERWACJA

Z biegiem czasu linki hamulca mogą się rozciągać i jeśli nie można dokonać dalszych regulacji, linki należy wymienić w serwisie. Za każdym razem przed użyciem chodzika należy sprawdzić czy kółka są zabezpieczone. Należy również sprawdzić czy hamulce działają prawidłowo a uchwyty i pokrętła są zabezpieczone. Jeżeli jakkolwiek część chodzika wydaje się luźna lub niepewna, należy zaprzestać jego użytkowania do czasu przeprowadzenia przeglądu przez autoryzowanego sprzedawcę.

HARMONOGRAM KONSERWACJI:

Tygodniowy

- Sprawdzić hamulce pod kątem wadliwego działania
- Sprawdzić wszystkie koła i części pod kątem poluzowanych śrub, nakrętek i pokręteł

Okresowo

- Kontrola uchwytów ręcznych pod kątem zużycia
- Sprawdzić, czy śruby ramy są bezpieczne
- Sprawdzić, czy śruby przedniej i tylnej osi są bezpieczne
- Sprawdzić materiał pod kątem zużycia lub pęknięć

Co roku

- Raz w roku należy oddać chodzik do serwisu, który przeprowadzi pełną kontrolę, czyszczenie i smarowanie wszystkich ruchomych części.

CZYSZCZENIE

Chodzik może być czyszczony za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki oraz ciepłej wody z mydłem. W razie potrzeby można użyć delikatnych domowych, antybakteryjnych środków do czyszczenia powierzchni. Należy uważać, aby nie pozostawić żadnych pozostałości po czyszczeniu na uchwytach do rąk. Może spowodować, że będą one śliskie podczas użytkowania. Nie należy używać skrobaczek ani szorstkich szczotek, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłok powierzchniowych. Nie wolno używać silnych detergentów do czyszczenia.

PRZECHOWYWANIE

Wyrób należy przechowywać w suchym chłodnym pomieszczeniu, z dala od wilgoci oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Pracownik służby zdrowia wskazuje na jego własną odpowiedzialność użytkowanie wyrobu osobom dorosłym i dzieciom, biorąc pod uwagę dostępne warianty/rozmiary/niezbędne funkcje/wielkość oraz wskazania, mając na uwadze informacje dostarczone przez producenta.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie należy stawać na tym produkcie.
2. Upewnij się, że oba uchwyty do pchania są ustawione na tej samej wysokości
3. Zawsze zachowuj bezpieczną odległość pomiędzy swoim chodzikiem a pieszymi lub obiektami.
4. Nie próbuj wymieniać kół swojego chodzika samodzielnie. Jeśli są one wadliwe lub wymagają wymiany skontaktuj się ze sprzedawcą.
5. Upewnij się, że chodzik jest całkowicie rozłożony przed ponownym użyciem.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregoś z poniżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem

UWAGA: Przed użytkowaniem należy sprawdzić czy wszystkie elementy zostały zmontowane poprawnie.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedawcy:

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net
e-mail:antar@antar.net

Data wydania instrukcji: 15.01.2023
v1-2 15.01.2023

