

higieniczna.



komfortowa,



plastyczna,



super lekka,



POIGNET – DOIGT – POUCE

0 ATTELE DE MAIN –

0 ORTESIS IMMOVILIZADORA PALMAR

WITH THUMB PADDING

0 WRIST-HAND-FINGERS SPLINT

Z UJĘCIEM KCIUKA

0 SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

WHOSP-FT

Qmed[®]



WHOSP-FT DRQF0D

Qmed[®]



Zastosowanie:

Schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i / lub redukujących dolegliwości bólowe. Zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Opis produktu:

Szyna nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka. Lekki, aluminiowo-stalowy stelaż pokryty pianką PVE zapewnia możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postępami leczenia i usprawniania. Konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców. Mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, tel. +48 42 6748384

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru szerokości ręki na wysokości stawów śródrečno-paliczkowych w centymetrach.

Dostępne rozmiary / szerokość ręki:

S – 6,5-8; **M** – 8-9,5; **L** – powyżej 9,5; wersja lewa i prawa.

Zakładanie:

Ukształtować szynę stosownie do zaleceń, ułożyć na niej dłoń i przedramię, ustabilizować zapinając pasy. Unikać profilowania bezpośrednio na pacjencie.

S **M** **L**



wersja **R** **L**

