



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## STOLIK PRZYŁÓŻKOWY EASY

Nr kat. 421 000, 421 014

**Zastosowanie:** EASY przeznaczony jest jako wyposażenie dodatkowe do łóżek szpitalnych czy rehabilitacyjnych. Może być także stosowany w warunkach domowych jako pomoc dla osób leżących, o ograniczonej sprawności ruchowej, do podawania posiłków, czytania i innych czynności.

**Montaż:** Dwie poręczki z kółkami należy przykręcić za pomocą śrub znajdujących się w zestawie do dolnej części kształownika szarego w kształcie litery „L” w miejscach wytłoczonych tak, by zapewniły stabilne połączenie. Czarne pokrętło (do regulacji wysokości) lekko wkręcić w otwór znajdujący się w górnej części szarego kształownika. Następnie do tego kształownika włożyć chromowany kształownik od kwadratowej strony po czym dokręcić pokrętło (regulacja wysokości). Na okrągłą część chromowanego kształownika ze skośnie ściętymi kształtkami nałożyć do końca blat tak by skośne części były równo ułożone i lekko weszły w rurkę pod blatem. Dokręcić znajdujące się na końcu pokrętło do oporu (regulacja kąta pochylenia blatu)

**Budowa i funkcje:** Stolik składa się z konstrukcji stalowej i laminowanego blatu (60 x 40cm) z brzegiem PCV. Konstrukcja stolika umożliwia następujące ustawienia:

- wysokość: w zakresie od 70cm do 110cm – regulacja bezstopniowa za pomocą pokrętła blokującego, mechanizm teleskopowy;
- kąt pochylenia blatu: bezstopniowy regulowany za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej części mechanizmu teleskopowego. Poluzowanie pokrętła daje możliwość regulacji kąta, następnie należy dokręcić pokrętło by zablokować żądany kont nachylenia blatu stolika;

Stolik Easy wyposażony jest w cztery kółka umożliwiające podjazd pod łóżko. Minimalna przestrzeń pod łóżkiem dla swobodnego podjazdu to 10 cm od podłogi.

**Utrzymanie czystości:** Blat czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor. Konstrukcję metalową w razie potrzeby przetrzeć zwilżoną szmatką.

**Gwarancja:** Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych mogących wystąpić w normalnym użytkowaniu. Ważna z dowodem sprzedaży.

---

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

**ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno**

**☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01**



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## STOLIK PRZYŁÓŻKOWY EASY

Nr kat. 421 000, 421 014

**Zastosowanie:** EASY przeznaczony jest jako wyposażenie dodatkowe do łóżek szpitalnych czy rehabilitacyjnych. Może być także stosowany w warunkach domowych jako pomoc dla osób leżących, o ograniczonej sprawności ruchowej, do podawania posiłków, czytania i innych czynności.

**Montaż:** Dwie poręczki z kółkami należy przykręcić za pomocą śrub znajdujących się w zestawie do dolnej części kształownika szarego w kształcie litery „L” w miejscach wytłoczonych tak, by zapewniły stabilne połączenie. Czarne pokrętło (do regulacji wysokości) lekko wkręcić w otwór znajdujący się w górnej części szarego kształownika. Następnie do tego kształownika włożyć chromowany kształownik od kwadratowej strony po czym dokręcić pokrętło (regulacja wysokości). Na okrągłą część chromowanego kształownika ze skośnie ściętymi kształtkami nałożyć do końca blat tak by skośne części były równo ułożone i lekko weszły w rurkę pod blatem. Dokręcić znajdujące się na końcu pokrętło do oporu (regulacja kąta pochylenia blatu)

**Budowa i funkcje:** Stolik składa się z konstrukcji stalowej i laminowanego blatu (60 x 40cm) z brzegiem PCV. Konstrukcja stolika umożliwia następujące ustawienia:

- wysokość: w zakresie od 70cm do 110cm – regulacja bezstopniowa za pomocą pokrętła blokującego, mechanizm teleskopowy;
- kąt pochylenia blatu: bezstopniowy regulowany za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej części mechanizmu teleskopowego. Poluzowanie pokrętła daje możliwość regulacji kąta, następnie należy dokręcić pokrętło by zablokować żądany kont nachylenia blatu stolika;

Stolik Easy wyposażony jest w cztery kółka umożliwiające podjazd pod łóżko. Minimalna przestrzeń pod łóżkiem dla swobodnego podjazdu to 10 cm od podłogi.

**Utrzymanie czystości:** Blat czyścić regularnie używając ogólnie dostępnych łagodnych środków posiadających atest PZH. Nie używać środków ściernych lub zawierających chlor. Konstrukcję metalową w razie potrzeby przetrzeć zwilżoną szmatką.

**Gwarancja:** Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych mogących wystąpić w normalnym użytkowaniu. Ważna z dowodem sprzedaży.

---

Wyprodukowane przez **HERDEGEN, Francja**

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktować się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem:

ASTON sp. z o.o., ul. Powstania Wlkp 45, 88 – 320 Strzelno

☎ (052) 318 38 57 lub 318 95 05, fax (052) 318 37 01