

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis sprzedawcy:

- 1) Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wózek inwalidzki od daty wydania wózka kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
- 5) Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie w przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebiccia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, nacisku na wózek inwalidzki powyżej 115kg, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną. Gwarancją nie są objęte elementy podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, jak np. opony, tkaniny miękkie, podłokietniki, dętki, łożyska, elementy gumowe i inne.
- 7) Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
- 8) NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOOCNICZE”.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane

INSTRUKCJA OBSŁUGI WÓZKEK INWALIDZKI ECON 220




1. Informacje ogólne


Wózek inwalidzki przeznaczony jest dla osób z czasową lub stałą niezdolnością do samodzielnego przemieszczania się. Zakupiony przez Państwa wózek może być użytkowany przez osoby o masie ciała do 120 kg.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać z niniejszą instrukcją. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkownika.


Instrukcja montażu wózka:

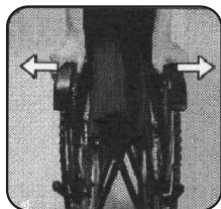

Rozciągnij poręcz

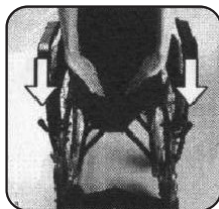

Wolno wepchnij siedzenie obciążone rękami

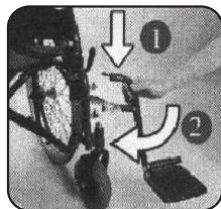


Załóż podnóżek. Upewnij się, że wspornik jest umieszczony w rowku, a podnóżek jest zablokowany




Opuść podnóżki


Instrukcja złożenia wózka:

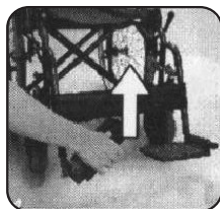

Odchyl podnóżki

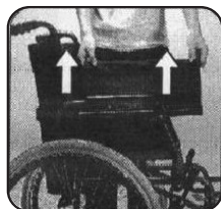

Trzymając za środek siedzenia lub ciągnąc za pasek, pociągnij obciążone rękami

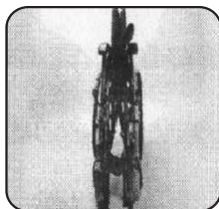


Składanie zakończone

Do produktu dołączony jest sześciokątny klucz - należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w tylnym woreczku.



Odchylenie podłokietnika - pociągnij za bolec, aby odchylić podłokietnik. Opuszczenie podłokietnika - przesuń podłokietnik do odpowiedniej pozycji. Upewnij się, że bolec jest odpowiednio umieszczony z przodu podstawy.

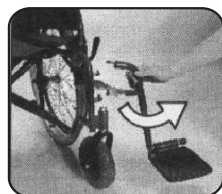

Odblokuj zamek, aby odłączyć podnóżek.

Produkt posiada odczepiane koła tylne. W celu ich odłączenia należy nacisnąć przycisk przy mocowaniu koła, a następnie pociągnąć koło do siebie.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- 1) Wsiadanie i zsiadanie z wózka powinno odbywać się przy wyregulowanych i zaciągniętych hamulcach;
- 2) Nie wolno używać hamulców podczas jazdy (jedynie podczas postoju)! Nie dotyczy to hamulca ręcznego używanego przez osobę pchającą wózek (w modelach posiadających tę opcję).
- 3) W przypadku pochylania się do przodu dbać, aby ciężar ciała nie przemieścił się zbyt daleko do przodu. W celu zwiększenia stabilności wózka, przed pochycieniem do przodu należy się upewnić, że koła przednie ustawione są do przodu w kierunku jazdy!
- 4) Nie pochylać się nadmiernie do przodu oraz nie wychylać się na boki poza obrys wózka!

UWAGA: NADMIERNE WYCHYLENIE DO PRZODU LUB NA BOKI MOŻE DOPROWADZIĆ DO WYPADNIĘCIA Z WÓZKA I POWSTANIA OBRAŹEN!

- 5) Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka nie należy stawać na podnóżkach, gdyż może to doprowadzić do przewrócenia się wózka;

UWAGA: STAWANIE NA PODNÓŻKACH MOŻE DOPROWADZIĆ DO PRZEWROCENIA WÓZKA I POWSTANIA OBRAŹEN!

- 6) Przy wjeżdżaniu na progi lub inne przeszkody, podczas przenoszenia całego ciężaru na tylne koła należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli występują obawy, czy manewr ten uda się wykonać w sposób bezpieczny należy bezwzględnie poprosić o pomoc drugą osobę.

UWAGA: NIEUMIĘJĘTNE LUB NIEOSTROŻNE PRZENOSZENIE CIĘŻARU CIAŁA NA TYLNE KOŁA DOPROWADZIĆ MOŻE DO PRZEWROCENIA WÓZKA DO TYŁU, CO JEST ZDARZENIEM BARDZO NIEBEZPIECZNYM, I POWSTANIA POWAŻNYCH OBRAŹEN! W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY MOŻLIWE BĘDZIE BEZPIECZNE POKONANIE PRZESZKODY NALEŻY BEZWZGLĘDNIEM POPROSIĆ O POMOC DRUGĄ OSOBĘ!

- 7) Podczas poruszania się wózkiem należy uważać, aby palce rąk nie dostały się pomiędzy szprychy. Może to doprowadzić do urazu ręki.
- 8) Podczas jazdy po pochyłościach należy zachować szczególną ostrożność i nie dopuszczać do rozpędzenia wózka. Jeżeli bezpieczne pokonanie pochyłości może sprawić trudność należy bezwzględnie poprosić o pomoc drugą osobę.

- 9) Należy unikać kontaktu wózka z otwartym ogniem. W przypadku bezpośredniego kontaktu elementów tekstylnych, plastikowych i gumowych z ogniem mogą się one zapalić.

3. Obsługa i konserwacja:

- wózek posiada składaną ramę – składa się go poprzez pociągnięcie do góry środkowej części siedziska (należy przedtem odłączyć poduszkę doczeponą do siedziska rzepem), a rozkłada poprzez dociśnięcie boków siedziska ku dołowi. **Należy zwrócić uwagę, aby boki siedziska spoczyły dokładnie w plastikowych zaczepach. Niedokładne rozłożenie siedziska może doprowadzić do pęknięcia zaczepów i uszkodzenia wózka.**

- okresowo należy dokonać sprawdzenia stanu wózka i konserwacji poprzez:

- a) kontrolę ciśnienia w ogumieniu – ciśnienie powinno być jednakowe w obu kołach i nie przekraczać 3,8 bara.
- b) kontrolę stanu opon – jeżeli wykazują one silne zużycie, należy dokonać ich jednoczesnej wymiany;
- c) sprawdzenie dokręcenia śrub elementów łączących;
- d) oczyszczenie wózka z zabrudzeń za pomocą wilgotnej szmatki;
- e) oczyszczenie tapicerki wilgotną szmatką, ewentualnie z dodatkiem środków czyszczących;
- f) zdezynfekowanie tapicerki wózka przeznaczonymi do tego atestowanymi środkami dezynfekującymi;

UWAGA: ZAKAZ POMPOWANIA KÓŁ KOMPRESOREM!

4. Jazda wózkiem

Podczas poruszania się na wózku dłonie należy układać w taki sposób, aby kciuk leżał wzdłuż górnej części koła, a palce przytrzymywały ich dolną część. Zapewnia to mocny chwyt i możliwość szybkiego puszczenia kół. Należy chwycić koła na wysokości oparcia i energicznym ruchem pchnąć je do przodu. Wzdłuż kół zamontowana jest prowadnica ułatwiająca pewne popychanie kół. Po wykonaniu ruchu dłonie należy cofnąć do punktu wyjścia, tak aby zakreśliły okrąg. Dzięki temu barki i ramiona nie pracują w czasie wykonywania ruchu powrotnego. Nie należy cofać dłoni do punktu startu wzdłuż koła napędowego. Wózek jest zbudowany w taki sposób, aby główne obciążenie spoczywało na kołach tylnych (dużych). W ten sposób koła przednie (małe) pozostają odciążone, co zapobiega ich uszkodzeniu. Opisany wyżej sposób konstrukcji stwarza jednak pewne ryzyko przewrócenia wózka przy ruszaniu się na rampach, pochylniach lub pokonywaniu przeszkód, jeśli nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa. W związku z tym prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami opisanymi w punktach „Zasady bezpieczeństwa” oraz „Pokonywanie przeszkód”.

5. Pokonywanie przeszkód:

- przy doborze wózka, w celu zakupu najlepszego modelu radzimy zasięgnąć opinii lekarskiej.
- jeżeli z jakichkolwiek powodów poruszając się na wózku nie są Państwo w stanie pokonać przeszkody, należy zwrócić się o pomoc. Próby pokonania przeszkody samodzielnie mogą zakończyć się wywróceniem wózka i urazem.
- większość użytkowników jest w stanie pokonać samodzielnie niewielkie przeszkody;
- zjazd z małego progu (krawężnika) – należy ustawić się przodem, prostopadłe do osi progu, upewnić się, czy podnóżki nie zawadzają o grunt i zjechać z progu. Należy unikać pochylania się do przodu;
- zjazd z dużego progu (krawężnika) – należy ustawić się tyłem prostopadłe do osi progu, pochylić się ku przodowi, przenieść środek ciężkości ku przodowi, a następnie zjechać z przeszkody kontrolując prędkość zjazdu przez odpowiednie podtrzymanie rękami kół napędowych;
- **przy stromych przeszkodach lub schodach należy zawsze prosić o pomoc;**
- wjazd na próg - wjazd na próg wymaga od użytkownika treningu oraz siły. Należy przenieść cały ciężar ciała na tylne koła i pokonać stopień pchając rękami koła napędowe i balansując ciałem. Wózek powinien być ustawiony prostopadłe do przeszkody. Poprzez balans ciałem należy unieść przednie koła na przeszkodzie, a następnie należy przenieść ciężar ciała do przodu (poprzez pochycenie się do przodu) i popychając koła napędowe wjechać na przeszkodę. **W przypadku stromych nachyleń lub wysokich przeszkód należy bezwzględnie poprosić o pomoc.** Osoba pomagająca kładzie nogę na jednej z wystających pod wózkiem rurek i przechyla wózek do tyłu, a następnie pokonuje przeszkodę.
- w przypadku jazdy po pochyłościach należy zachować szczególną ostrożność, aby nie utracić kontroli nad wózkiem. Należy przez cały czas kontrolować prędkość wózka i nie dopuszczać do jego rozpędzenia. Jeżeli istnieją wątpliwości, czy daną pochyłość uda się bezpiecznie pokonać, należy bezwzględnie poprosić o pomoc drugą osobę.

Wytwórca:

Karma Medical Products Co. Ltd., No. 2363 Sec. 2 Da Shiue Road, Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Tajwan

Autoryzowany Przedstawiciel:

Karma Medical Products (UK) Ltd., 28 Newfield Road, Hagley, Stourbridge, West Midlands, DY9 0JR, Wielka Brytania

Wylączny Importer:

ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43;
tel. 22 518 36 00; fax 22 518 36 30; 22 518 36 31
E-mail: antar@antar.net; WWW: www.antar.net

