



Modele: AT02004; AT02005; AT02006; AT02007

Balkonik – instrukcja użytkownika.

Balkoniki są lekkimi, wygodnymi w użytkowaniu wyrobami, przeznaczonymi do pomocy w przemieszczaniu się osobom o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Zapewniają użytkownikowi podparcie, zmniejszając ryzyko przewrócenia się użytkownika, a także umożliwiają mu chodzenie z zachowaniem podparcia z obu stron. Maksymalna waga użytkownika wynosi 150 kg.

MODELE:

W zależności od potrzeb oraz preferencji użytkownika możliwy jest wybór jednej z 4 wersji balkoników:

AT02004 – wersja z 4 stopkami, przestawna. Zapewnia największą stabilność. W celu przestawienia balkonika niezbędne jest podniesienie go. Zalecana jest głównie do przemieszczania się na krótkich odcinkach.

AT02005 – wersja z 2 kołami. Umożliwia przesunięcie balkonika bez konieczności podnoszenia go.

AT02006 – wersja z 4 kołami. Koła tylne obrotowe z hamulcami. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika do przodu, a w razie potrzeby możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób niemających problemów z równowagą.


AT02007 – wersja z 4 kołami obrotowymi. Wyrób pozwala na szybkie przemieszczanie się użytkownika we wszystkich kierunkach, a w razie potrzeby możliwe jest zablokowanie balkonika poprzez włączenie hamulców. Model ten polecany jest dla osób o dużej mobilności, niemających problemów z równowagą.

OSTRZEŻENIA:

- 1) Nie używać modeli AT02006 oraz AT02007 w przypadku osób mających zaburzenia równowagi. Może to doprowadzić do przewrócenia się użytkownika.
- 2) Nie wychylać się poza obręb balkonika. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
- 3) Nie bujać balkonikiem. Grozi to przewróceniem się użytkownika.
- 4) W przypadku balkonika czterokołowego (AT02006, AT02007), jeżeli w danym momencie nie jest on użytkowany – należy włączyć jego hamulce.
- 5) Nie stosować, jeżeli waga użytkownika przekracza 150 kg.
- 6) Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem. Wyrób może się zapalić.
- 7) Należy upewnić się, że po zamontowaniu klipsa mocującego stopki lub kółka stalowy bolec przechodzi przez otwór po obu stronach ścianki. W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec odkształceniu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

Balkonik rozkłada się poprzez złapanie za przednią część ramy w pobliżu obu miejsc mocowania sznurka i odciągnięcie od siebie obydwu tych części aż do oporu. Składanie balkonika odbywa się poprzez pociągnięcie za kulkę (gałkę) w kierunku tylnym.

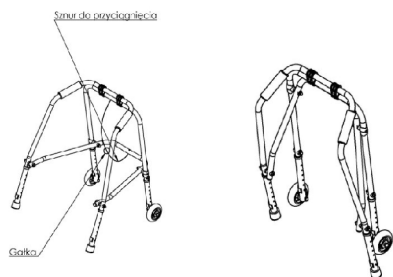

- 1) Firma AN TAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43, udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania kupującego. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
- 2) W okresie gwarancji AN TAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
- 3) AN TAR zwraca sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna, że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną.
- 4) W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezwzględnie wystąpić na adres firmy AN TAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
- 5) Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje utratę gwarancji!
- 6) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przecięcia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, naciśnięć, przekraczających maksymalną wagę użytkownika opisaną w instrukcji obsługi, uszkodzenia wyrobu z substancjami lub olejami, benzyną.
- 7) NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU TOWARU (PARAGONEM FISKALNYM, RACHUNKIEM, BĄDŹ FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZENIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA GWARANCJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE DOŁĄCZENIE KOPII "ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOOCNICZE."
- 8) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu nie będą uwzględniane.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Pięczęć punktu sprzedaży:

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy wyregulować jego wysokość. W tym celu należy wyjąć klips, wyregulować wysokość – jednakową dla wszystkich czterech nóg, a następnie wsunąć klips w odpowiedni otwór. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STALOWY BOLEC PRZECHODZI PRZEZ OTWÓR PO OBU STRONACH ŚCIANKI. W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec odkształceniu.

PORUSZANIE SIĘ Z BALKONIKIEM

- AT02004 – Balkonik przestawia się poprzez uniesienie go i postawienie nieco z przodu.
- AT02005 – Balkonik przesuwa się do przodu poprzez uniesienie jego tyłu, popchnięcie i postawienie części tylnej na ziemi.
- AT02006 – Balkonik przesuwa się do przodu poprzez popychanie go. JEŻELI W DANYM MOMENCIE UŻYTKOWNIK NIE UŻYWA WYROBU NALEŻY WŁĄCZYĆ HAMULCE.
- AT02007 – Balkonik przesuwa się w dowolną stronę poprzez popychanie go. JEŻELI W DANYM MOMENCIE UŻYTKOWNIK NIE UŻYWA WYROBU NALEŻY WŁĄCZYĆ HAMULCE.

KONSERWACJA WYROBU

Wyrób należy okresowo wyczyścić za pomocą wody i środków czystościowych. Wyrób może być poddawany działaniu środków dezynfekujących. Nieużywany wyrób powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu. Unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO WYROBU

Po wycofaniu z użytkowania wyrób może być traktowany jako odpad komunalny. Zaleca się segregację podczas utylizacji po wycofaniu wyrobu z eksploatacji.

ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

