
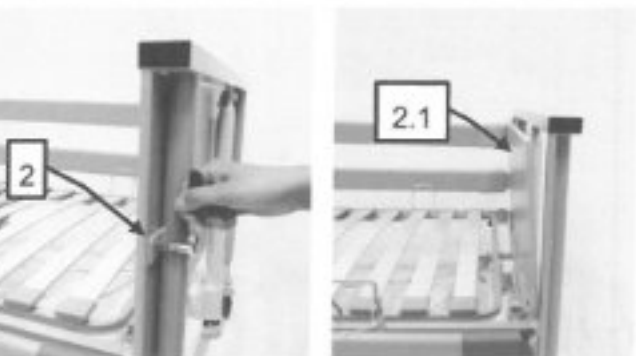
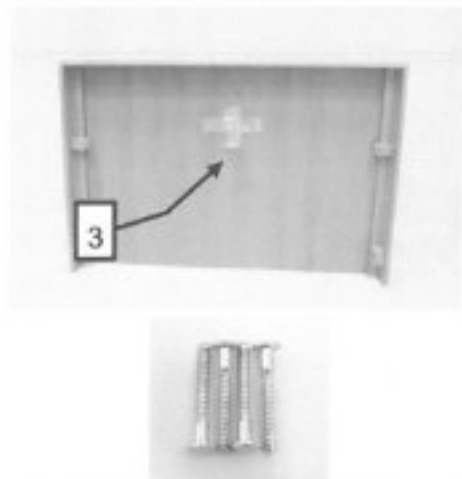
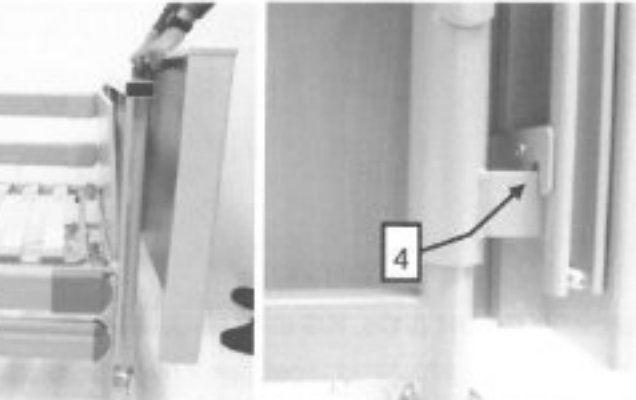


Dali care bed EN + DE


Installation instructions for attaching wooden surround to chassis head or foot end

Proceed as follows:

<p>1. Prepare the bed for installation: Remove the plastic stoppers [1] from both ends of the chassis cross profile.</p> <p>Przygotowanie łóżka do montażu: Usunąć plastikowe zaślepki po obu stronach profilu wezglowia.</p>	
<p>2. Remove the two screws on the left and right-hand side [2] to release the panel [2.1].</p> <p>Usunąć dwie śruby (po prawej i lewej stronie) aby odpiąć panel wewnętrzny wezglowia.</p>	
<p>3. Take the new screws out of the bag on the back of the wooden surround [3].</p> <p>Nowe śruby mocujące maskownice (dłuższe, 4 szt.) znajdują się wewnątrz opakowania z maskownicami.</p>	
<p>4. Fit the wooden surround to the chassis so the hooks inside the surround (on both sides) fit exactly over the lugs on the chassis [4].</p> <p>Dopasuj drewniane maskownice do wezglowia za pomocą haków (wewnątrz maskownicy, po obu stronach) jak na zdjęciu 4.</p>	

5. Now assemble the chassis panel and the wooden surround using the new screws [5] (refer to step 3).

Dopasuj wezglowie z maskownicami w taki sposób, aby można było wkręcić śruby jak na zdjęciu 5.

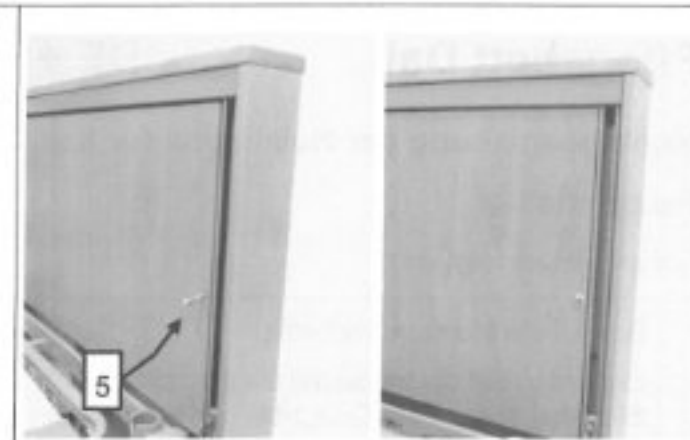

6. Final result showing wooden surround fitted

Zdjęcie pokazujące zamontowaną maskownicę.



Burmeier GmbH & Co. KG (A Stügelmeier Group company)

Pivitsfelder Straße 270, 32791 Lage/Lippe, Germany - Phone: + 49 (0) 5232 / 9841 - 0 • Fax: + 49 (0) 5232 / 9841- 41

www.burmeier.de Email: info@burmeier.de

18/04/2019 | Version 0 | 279525