

Instrukcja użytkowania  
Orteza stawu kolanowego Rebound®  
Wydanie 02.2014



**Wskazania do zastosowania ortezy:**

Łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

**Przeciwwskazania:**

Stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego.

**UWAGA:**

Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.

Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana przez wykwalifikowany personel medyczny.

Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ortezy u pacjentów z cukrzycą, zaburzeniami krążenia lub czucia – ortezy powinna być stosowana wyłącznie na zlecenie lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. Stan skóry pacjenta powinien być regularnie kontrolowany.

Przed użyciem ortezy należy szczegółowo przeczytać instrukcję.

Jeśli podczas użytkowania ortezy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

Przed użyciem ortezy sprawdź czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości skontaktuj się z dystrybutorem.

**Elementy ortezy**

A – oddychający korpus ortezy

B - otwór na rzepkę



C – kieszenie na szyny z zegarem

D – taśmy stabilizujące

E – policentryczny zegar

F – szyny stabilizujące (ramiona zegara)

G – stabilizacja rzepki (tylko w wersji zamkniętej)

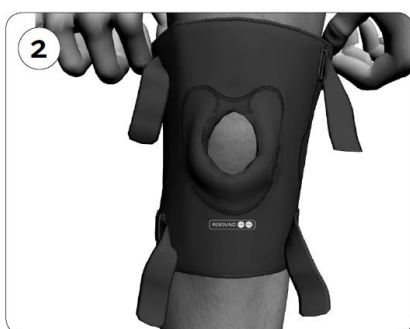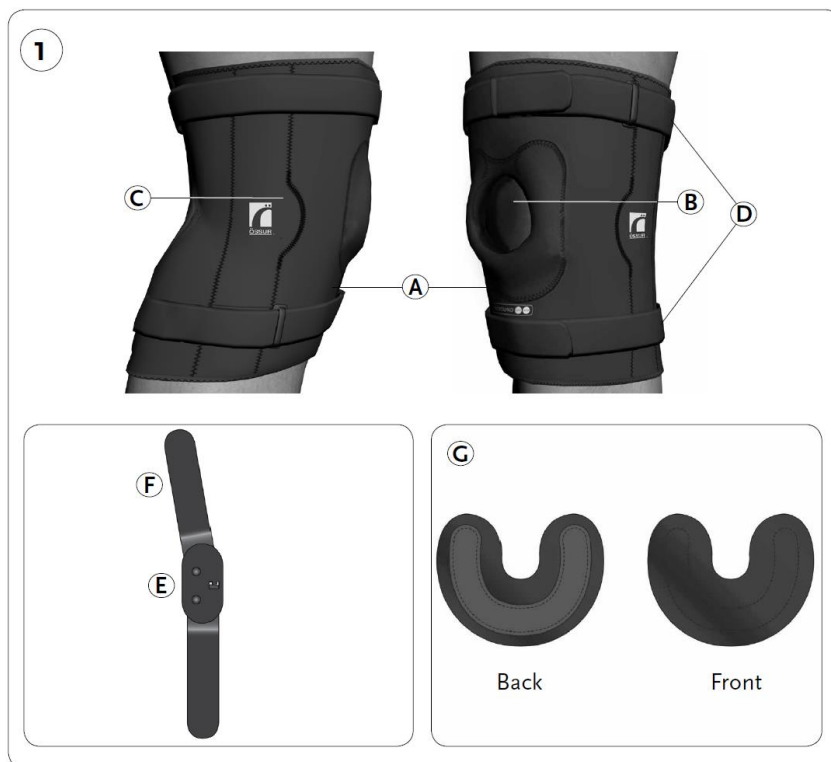

Dla zwiększenia efektywności ortezy dopasuj kształt szyn oraz stabilizację rzepki do indywidualnych potrzeb.

Przed założeniem ortezy wyjmij szyny z kieszeni znajdujących się w jej korpusie. Wygnij szyny tak, aby pasowały do kształtów kończyny. Umieść szyny z powrotem w kieszeniach i upewnij się że są one właściwie umocowane.

Dopasuj stabilizację rzepki przed założeniem ortezy. Pierścień stabilizujący rzepkę może być przycięty lub zamontowany w innym położeniu w zależności od indywidualnych potrzeb terapeutycznych.

**Zakładanie ortezy:**

Wersja zamknięta: wciągnij korpus ortezy przez stopę tak aby rzepka znalazła się w przeznaczonym dla niej otworze. Rys 2

Wersja otwarta: zapnij ortezę wokół kolana zaczynając od części dolnej tak aby rzepka znalazła się z przeznaczonym dla niej otworze. Rys 3.

Rozwiń i zapnij wszystkie taśmy stabilizujące według kolejności wskazanej na rysunku 4.

**Konserwacja:**

Przed praniem wyjąć szyny wraz z zegarami z kieszeni korpusu i zapisać wszystkie rzepy tak aby podczas prania nie zniszczyły tkaniny.

Korpus prać ręcznie (temp. Maks. 30°) z dodatkiem łagodnych detergentów, suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Zamek czyścić wodą lub sprężonym powietrzem. Użycie suchych środków smarujących jest wskazane jeśli zamek jest czyszczony przy pomocy wody.

**Skład:**

nylon, elastan, poliester

**UWAGA**

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE  
LEKARZ SPECJALISTA



ÖSSUR HEAD OFFICE  
Grjóthals 5  
110 Reykjavik, Iceland  
Tel: +354 515 1300  
Fax: +354 515 1366  
[mail@ossur.com](mailto:mail@ossur.com)  
[www.ossur.com](http://www.ossur.com)

Dystrybutor:



mdh sp. z o.o.  
ul. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +4842 637 59 79  
fax +4842 636 52 21  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl)

