



Instrukcja użytkowania

AT51031 Chodzik



Chodzik zewnętrzny jest wyposażony w hamulec postojowy i siodełko z oparciem z tapicerką. Wysokość uchwyty jest regulowana, a chodzik może być złożony do transportu lub do przechowywania.

Przed złożeniem lub pierwszym użyciem chodzika należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przed dokładnym przeczytaniem niniejszej instrukcji obsługi urządzenie NIE może być składane ani używane.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie służy jako pomoc przy chodzeniu, oparcie i pomoc przy noszeniu mniejszych przedmiotów zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz. Przeznaczone jest ono do korzystania przez użytkownika z ograniczoną zdolnością ruchową i wymienioną poniżej maksymalną wagę ciała.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkownika chodzika, użytkownik powinien posiadać odpowiednie zdolności fizyczne, poznawcze i zdolności widzenia. W razie wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą/specjalistą, który zalecił korzystanie z chodzika.

Bardzo ważne jest to, aby użytkownik przed pierwszym korzystaniem z urządzenia zapoznał się dokładnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Wymienione tutaj wskazówki powinny zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała użytkownika lub osoby trzeciej, jak również uszkodzeniu chodzika lub znajdujących się w nim przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Na poszczególnych częściach ramy nie można stać. Rama urządzenia nie jest przewidziana do takiego celu.

BEZPIECZEŃSTWO

Chodzik może być wykorzystywany przez osobę o maksymalnej wadze 136 kg.

TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA.



NALEŻY PRZESTRZEGAĆ:

- (1) Proszę się upewnić, że hamulec pozostawionego bez nadzoru chodzika jest zawsze zablokowany/zaciągnięty.
- (2) Przed rozpoczęciem korzystania proszę się upewnić, że wszystkie koła, a w tym ruchome koła są pewnie przymocowane.
- (3) Proszę się upewnić, że hamulce funkcjonują prawidłowo.
- (4) Przed pierwszym użytkowaniem proszę sprawdzić wysokość uchwyty i jego prawidłowe zamocowanie.
- (5) Proszę się upewnić, że chodzik jest całkowicie rozłożony.
- (6) Przy rozkładaniu chodzika rama powinna zostać ustawiona w prawidłowej pozycji.
- (7) Aby uniknąć przyciśnięcia palców, proszę trzymać się z dala od mechanizmu składania.
- (8) Aby odpowiednio dostosować chodzik do Państwa potrzeb, proszę skontaktować z doradcą fachowego personelu.
- (9) Przy podnoszeniu lub przenoszeniu chodzika należy zachować ostrożność.

KONSERWACJA

1. Proszę się upewnić, że WSZYSTKIE elementy wyposażenia są zawsze prawidłowo dokręcone.
2. Proszę sprawdzić, czy śruby, przyciski i gałki kół i ruchomych kół są dokręcone. Proszę sprawdzić, czy hamulec funkcjonuje prawidłowo i że uchwyty są odpowiednio zabezpieczone.
3. Zużyte lub uszkodzone części należy niezwłocznie wymienić.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

CZYSZCZENIE

Do czyszczenia chodzika potrzebujecie Państwo wilgotnej ściereki lub gąbki i ciepłej wody z mydłem. W razie potrzeby mogą być również wykorzystane zwykłe środki dezynfekcji. Proszę się upewnić, że na czyszczonych powierzchniach nie pozostała woda lub resztki środków do czyszczenia i że nie są one śliskie. Proszę nie korzystać z szorstkich środków do czyszczenia lub skrobaków – mogą one uszkodzić warstwę lakieru.

USTAWIENIE I OBSŁUGA HAMULCÓW

Hamulec główny (przy przesuwaniu): Proszę pociągnąć drążek hamulca do góry.

Hamulec postojowy (przy parkowaniu): Proszę wcisnąć drążek hamulca do dołu. (proszę zobaczyć ilustrację 1).

Ustawienie hamulca: Aby zwiększyć napięcie linki hamulcowej, proszę przekręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; następnie – aby zachować takie ustawienie – proszę przekręcić mocujący w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i proszę przy tym przytrzymać śrubę regulacji (proszę zobaczyć ilustrację 2).

WSKAZÓWKA: W przypadku każdej niepewności proszę się skontaktować z Obsługą Klienta. Zmiany ustawień hamulca mogą prowadzić do zmniejszenia siły hamowania.

SKŁADANIE I PRZECHOWYWANIE CHODZIKA

1. Proszę pociągnąć pasek w środkowej części siodełka do góry, aby złożyć chodzik - ilustracja 3.

ZABRONIONE JEST:

- (1) Wykorzystywanie chodzika do przewożenia osób – urządzenie nie zostało zaprojektowane jako wózek inwalidzki.
- (2) Nie siedać na chodziku bez zablokowanego hamulca – może to wprawić chodzik w ruch i może dojść do obrażeń ciała u użytkownika lub u osoby trzeciej.
- (3) Nie siedać na chodziku na pochyłości bez aktywowanego hamulca postojowego.



ilustracja 1



Śruba regulacyjna

Nakrętka zabezpieczająca

ilustracja 2

- (4) Nie siadać na siodełku z rozmachem – proszę siadać ostrożnie i w kontrolowany sposób, w razie potrzeby należy poprosić o pomoc.
- (5) Nie zawieszac na drążku hamulca lub na uchwytach żadnych przedmiotów, może to zakłócić funkcjonowanie hamulców i/lub stabilność chodzika.
- (6) Proszę nie stawiać na chodziku lub nie wykorzystywać go jako podpórki dla stóp.



ilustracja 3

1. Usunąć opakowanie. Chodzik jest złożony.

2. Rozłożyć chodzik, wcisnąć siodełko po obu stronach do dołu – Ilustracja 4.

WSKAZÓWKA: Obie strony muszą być zablokowane w odpowiednim ustawieniu ze słyszalnym „Klick”.


3. Zawiesić torbę.

USTAWIENIE WYSOKOŚCI

Odpowiednie dostosowanie

Przed pierwszym użyciem chodzika proszę się upewnić, że jest on całkowicie rozłożony i że rama jest prawidłowo zablokowana i sztywna. Ważne jest to, aby ustawić wysokość chodzika prawidłowo w komfortowej pozycji.

1. W tym celu proszę opuścić ręce i ustawić uchwyty chodzika na wysokości nadgarstków.
2. Przy trzymaniu uchwytów łokcie powinny być zgięte pod kątem 15°-20°.
3. Jeżeli jesteście Państwo zmuszeni się schylać lub podnosić ręce, aby dosięgnąć chodzika, proszę skorygować wysokość.
4. Przy tym proszę wykręcić śrubę skrzydełkową i proszę ustawić uchwyt na prawidłowej wysokości. Proszę powtórzyć tę czynność po drugiej stronie chodzika i proszę sprawdzić przed użyciem, czy oba uchwyty są zablokowane na tej samej wysokości i prawidłowo.

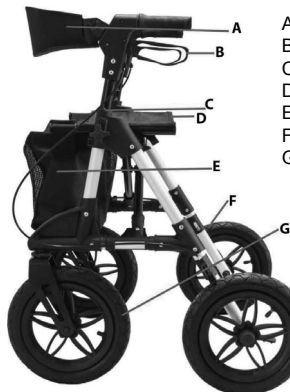

- A – Oparcie
- B – Drażek hamulca
- C – Uchwyt z regulacją wysokości
- D – Siodełko
- E – Torba
- F – Średnica tylnych kół 30 cm
- G – Średnica przednich kół 30 cm



ilustracja 4

WSKAZÓWKA: Aby określić prawidłową wysokość chodzika, proszę się skontaktować z lekarzem lub fachowym sprzedawcą.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA: zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem!

UWAGA: W przypadku nieprawidłowego korzystania z wyrobu może zaistnieć ryzyko wyrwania się. Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących wsiadania/zsiadania/poruszania się. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
- należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi wyrobu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.





KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na chodzik, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net



Data wydania instrukcji: 14.05.2021
v1-2 14.05.2021