

## Orteza na rękę i przedramię z ujęciem kciuka

Thumb Spica

Instrukcja użycia

Wydanie 02.14



### **Wskazania do stosowania:**

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń)


### **Przeciwwskazania:**

Stany wymagające unieruchomienia stawu nadgarstkowego np. złamania dystalnych części kości przedramienia lub kości nadgarstka.

### **UWAGA**

Produkt powinien być użytkowany przez jednego pacjenta. Nie powinien być stosowany do zaopatrzenia innych osób po użyciu przez jednego pacjenta.

Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy z dopasowaniem lub użytkowaniem ortozy zgłoś się do wykwalifikowanego personelu medycznego.

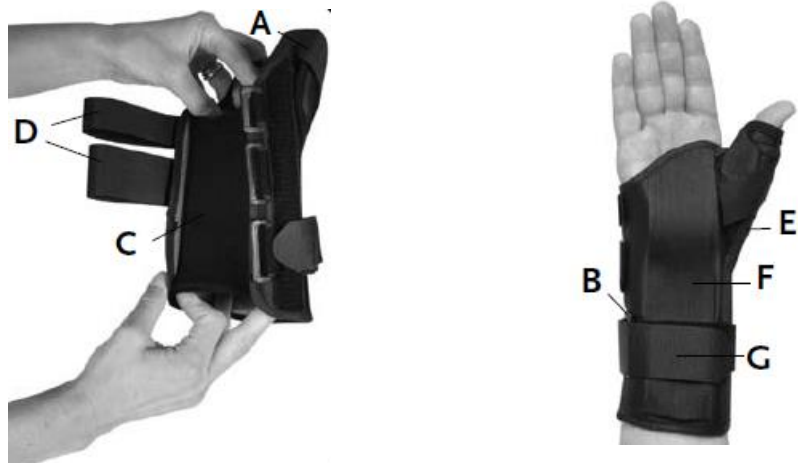

**Opis zdjęcia:**

A – taśma stabilizująca kciuk

B – taśma stabilizująca nadgarstek z pierścieniem służący do jej zapinania

C – pierścienie do zapięcia pozostałych taśm stabilizacyjnych

D – taśmy stabilizacyjne

E – szyna stabilizująca kciuk

F – dłoniowa szyna stabilizująca



### Instrukcja zakładania:

1. Odepnij wszystkie taśmy stabilizacyjne.
2. Wsuń dłoń w ortezę tak aby kciuk znalazł się w przeznaczonym dla niego miejscu, szyna dłoniowa po dłoniowej stronie nadgarstka a pierścienie do zapięcia taśm stabilizacyjnych na grzbietowej stronie dłoni.
3. Stabilizująca szyna dłoniowa może być doksztaltowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta ale jedynie przez wykwalifikowany personel medyczny.
4. Szyna stabilizująca kciuk może być doksztaltowana według wymagań medycznych i indywidualnych potrzeb pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny.
5. Zapnij taśmy stabilizujące oraz taśmę stabilizującą nadgarstek. Taśmy powinny być zapięte tak aby zapewniać stabilizację (dobre przyleganie szyn stabilizujących) ale jednocześnie nie ograniczały swobodnej cyrkulacji krwi w kończynie.
6. Zapnij taśmę stabilizującą kciuk. Wszystkie taśmy stabilizujące mogą być przycięte do pożądanej długości.

### Konserwacja:

Przed praniem usuń szyny stabilizujące. Orteza bez szyn stabilizujących może być prana ręcznie w letniej wodzie z użyciem łagodnych detergentów. Nie prać w pralce, nie chlorować. Nie wyżymać. Delikatnie wycisnąć. Suszyć w pozycji rozłożonej z dala o sztucznych źródeł ciepła.



### UWAGA

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze zmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU  
ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA



Grjothals 5, 110 Reykjavik, Iceland



Dystrybutor:



mdh sp. z o.o.  
ul. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +4842 637 59 79  
fax +4842 636 52 21  
www.mdh.pl

