

Instrukcja użycia
Orteza pooperacyjna stawu kolanowego
Aparat na goleń i udo
REHAB
Wydanie 10.2013



Uwaga

Produkt został stworzony i zaprojektowany do użytku przez jednego pacjenta. Nie zaleca się jego stosowania przez kilku pacjentów. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek problemy podczas stosowania ortezy należy niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym personelem medycznym.

Wskazania:


Stany po zabiegach operacyjnych oraz urazach stawu kolanowego wymagające unieruchomienia kończyny w wybranym terapeutycznym zakresie ruchu.

Przeciwwskazania:

Stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego w opatrunku gipsowym. Nie gojące się rany i owrzodzenia w obrębie stosowania ortezy.

UWAGA

1. Ostateczną decyzję o zastosowaniu ortezy skonsultuj z lekarzem lub fizjoterapeutą. Upewnij się, że jest właściwym zaopatrzeniem w przypadku Twojej dysfunkcji
2. Przed każdym użyciem sprawdź czy na Twojej skórze nie ma otarć, zaczerwienień ani żadnych innych zmian. Jeśli podczas użytkowania ortezy zauważysz jakiegokolwiek podrażnienie skóry, wysypkę czy inne niepokojące zmiany natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą.
3. Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana przez wykwalifikowany personel medyczny.
4. O ograniczeniu kątowym ruchu decyduje lekarz lub terapeuta.

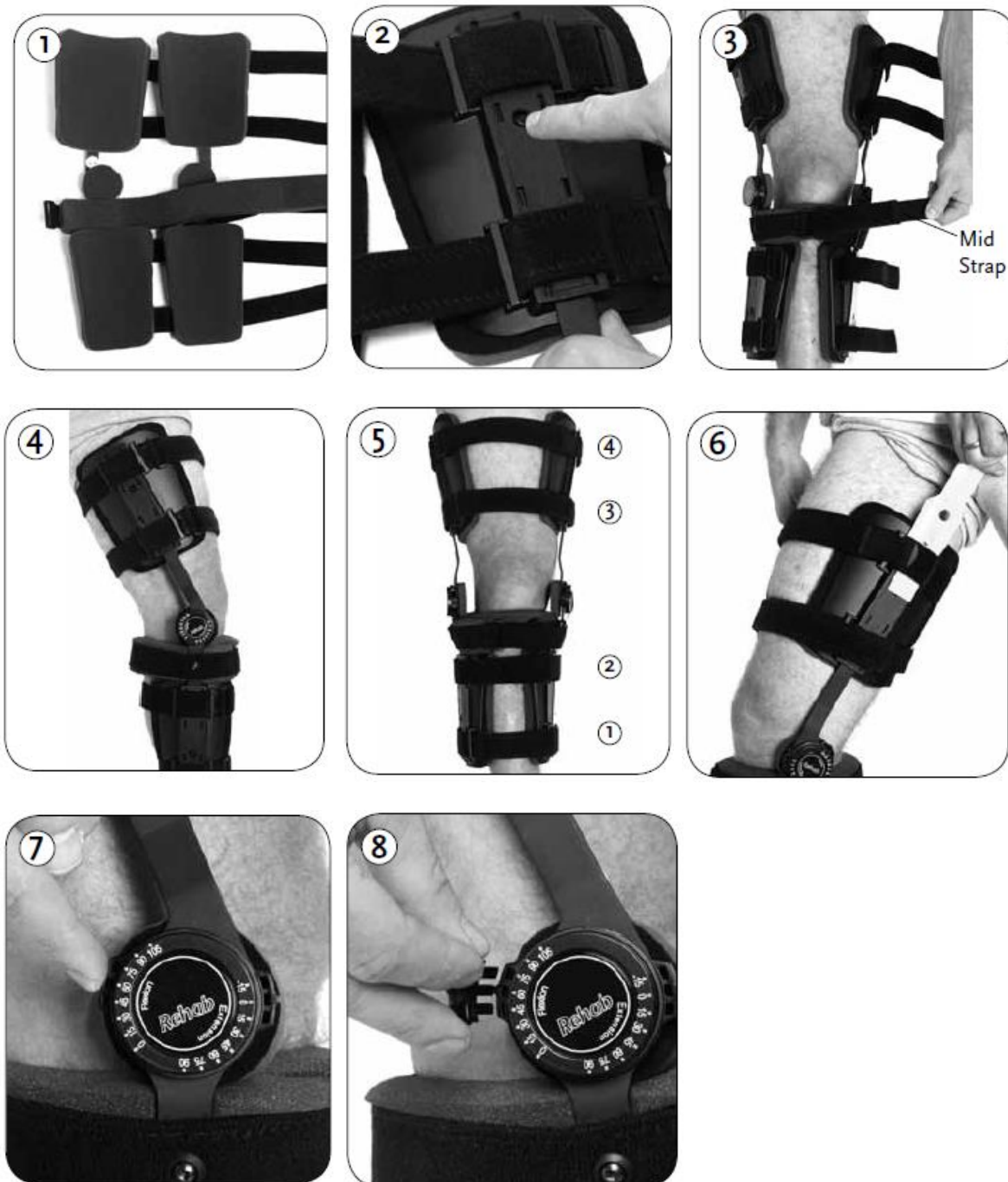

Regulacja długości ortezy:

1. Szyny stabilizujące (dwie górne i dwie dolne) muszą być ustawione w tej samej pozycji (rys.1). Ich niesymetryczne ustawienie może powodować złe ułożenie i przemieszczanie się zegara a także zsuwanie się ortezy.
2. Aby wyregulować ustawienie poszczególnych szyn stabilizacyjnych naciśnij przycisk znajdujący się na szynie rozsuwając ją na pożądaną długość (zgodnie z oznaczeniami na szynowaniu symetrycznie z obydwu stron). Zwolnij przycisk (rys.2).

Zakładanie ortezy:

1. Rozepnij wszystkie taśmy, włącznie z taśmą podrzepkową .
2. Ustaw ograniczenie kątowe
3. Umieść orteżę na nodze pacjenta tak, aby oś zegara znajdowała się na wysokości górnej krawędzi rzepki. Zabezpiecz pozycję zegara zapinając taśmę podrzepkową (rys.3).
4. Zegar powinien się znajdować dokładnie w linii środkowej bocznej kończyny (dokładnie pośrodku między przodem i tyłem kolana) (rys. 4).

5. Zegary i szyny powinny być ustawione symetrycznie (zegary, taśmy stabilizujące powinny być ułożone równoległe (rys.5)
6. Zapnij taśmy przekładając je przez pierścienie mocujące i zapinając przy pomocy końca zaopatrzonego w rzep (rys. 3)
7. Taśma podrzepkowa powinna być zapięta tak mocno jak to możliwe nie ograniczając jednocześnie swobodnej cyrkulacji krwi. Dopasuj odpowiednio długość taśmy, to zapewni właściwe umiejscowienie ortezy.

Dopasowanie długości taśm:

1. Ustaw szyny podudzia tak aby były równoległe do piszczeli. Naciągnij taśmę nr 1 (rys.5) przytrzymując drugą ręką szynę, aby pozostała równoległa do osi długiej kończyny -przełóż taśmę przez pierścień mocujący a następnie zapnij z powrotem na jej własnej powierzchni przy pomocy umieszczonego na końcu rzepa
2. Ustaw szyny udowe tak aby były równoległe do kości udowej.
3. Zapnij taśmy nr 2, 3, 4 w taki sam sposób jak taśmę nr 1 (rys.5)
4. Kiedy taśmy są odpowiednio dopasowane i zapięte (ich długość jest właściwie dostosowane) wyjmij żółte elementy zabezpieczające znajdujące się na szynowaniu bezpośrednio pod taśmami. Dociśnij taśmy do znajdującego się pod nimi w tym miejscu rzepa (rys. 6). Dzięki temu długość taśm zostanie ustalona na stałe i nie będzie konieczności ich regulacji przy każdym założeniu. Ortezy jest dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Regulacja zakresu kątownego ruchu:

1. Naciśnij przycisk na zegarze i ustaw pożądany kąt wyprostowania (rys. 7)
2. Naciśnij i ustaw pożądany kąt zgięcia (rys. 7)
3. Po ustawieniu właściwego zakresu kątownego ruchu umieść blokady zamka we właściwym miejscu (zgodnie z rys. 8)
4. Pamiętaj, aby ustawienia na zegarach były jednakowe po obydwu stronach

UWAGA

Nie jest możliwe zastosowanie blokad zamka przy ustawieniu kąta zgięcia 105°.

Konserwacja:

Wyściółki odzepić od szyn i prać ręcznie w letniej wodzie (30°) z dodatkiem łagodnych detergentów. Nie chlorować. Nie wyżymać. Suszyć w pozycji rozłożonej z dala od sztucznych źródeł ciepła.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ
SPECJALISTA



ÖSSUR HEAD OFFICE

Grjóthals 5
110 Reykjavik, Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com
www.ossur.com

Dystrybutor :



mdh sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +4842 637 59 79
www.mdh.pl